

## Instrukcja użycia

# HERPotherm®

Prosty | szybki | dobrze tolerowany  
wyrób medyczny do leczenia objawowego opryszczki

### Wskazania do użycia

Herpotherrm® to opatentowany wyrób medyczny, przeznaczony do miejscowego leczenia objawów towarzyszących opryszczce (opryszczka zwykła warg lub narządów płciowych), takich jak pieczenie, mrowienie, swędzenie lub uczucie napięcia skóry.

Herpotherrm® zastosowany niezwłocznie może całkowicie zapobiec wystąpieniu opryszczki. W przypadku późniejszego zastosowania można uzyskać lżejszy przebieg albo wcześniejsze wygojenie.

### Działanie

Działanie Herpotherrm® polega wyłącznie na zastosowaniu skoncentrowanego ciepła i dlatego produkt ten nie zawiera żadnych środków chemicznych.

Herpotherrm® można stosować także u kobiet ciężarnych, osób z alergią i u dzieci (do samodzielnego stosowania po ukończeniu 12. roku życia).


Zastosowanie skoncentrowanego ciepła (miejscowa hipertermia) jest bardzo obiecującą metodą fizykalną, polegającą na krótkotrwałym przyłożeniu skoncentrowanego ciepła do ściśle ograniczonego obszaru skóry.

W temperaturze otoczenia około 50°C wirus opryszczki jest termolabilny. Bezpośredni kontakt z taką temperaturą powoduje jego dezaktywację. W ten sposób można powstrzymać namnażanie się wirusa opryszczki. Ponadto w tej temperaturze w komórkach powstają białka szoku cieplnego, które pobudzają układ immunologiczny.

Dzięki krótkotrwałej aplikacji nie dochodzi do uszkodzenia skóry.

### Stosowanie

Stosowanie urządzenia Herpotherrm® jest bardzo proste. Urządzenie przykłada się do skóry w miejscu zmiany i lekko dociska. Po uruchomieniu przełącznikiem ceramiczna powierzchnia kontaktowa nagrzewa się do temperatury około 51°C. W chwili osiągnięcia tej temperatury zapali się dioda LED. Dioda ta gaśnie, kiedy urządzenie automatycznie wyłączy się po upływie 3 sekund pracy. Na początku fazy rozgrzewania i na koniec działania rozlega się dodatkowo sygnał dźwiękowy. Można powtórzyć terapię po krótkiej przerwie, wynoszącej około 10 sekund. Urządzenie można bez problemu czyścić dostępnymi w handlu chusteczkami do dezynfekcji z alkoholem.

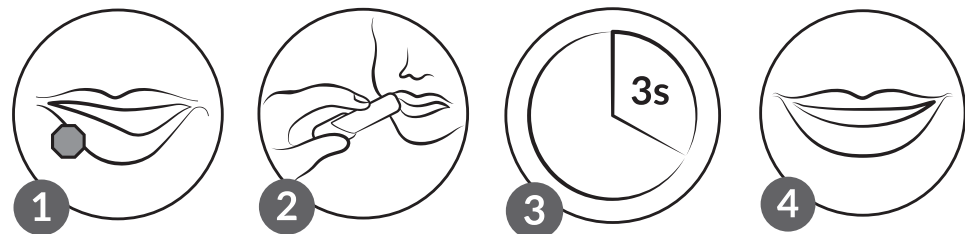

**Uwaga:** W przypadku utrzymujących się albo nawracających objawów należy ponownie zastosować urządzenie, zachowując krótką, co najmniej 10-sekundową przerwę.

### Wskazówki dotyczące użytkowania

Herpotherrm® jest przeznaczony do obsługi wyłącznie przez osoby dorosłe i dzieci po ukończeniu 12. roku życia. Z przyczyn higienicznych oraz w celu uniknięcia przenoszenia wirusa Herpotherrm® jest przeznaczony do użytku tylko przez jedną osobę.


Opryszczka to choroba wirusowa, wywołwana przez wirusy opryszczki pospolitej (*Herpes simplex*). Choroba ta przenosi się drogą zakażenia kropelkowego, przez kontakt bezpośredni lub kontakt z wydzieliną.

Całkowite pozbycie się infekcji wirusem *herpes simplex* jest niemożliwe.

Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia Herpotherrm® na skutek ewentualnego wycieku kwasu z baterii należy, w przypadku dłuższej przerwy w stosowaniu produktu, wyjąć z niego baterię.

W celu wymiany baterii należy zdjąć osłonę ochronną i osłonę baterii, a następnie, po włożeniu baterii, ponownie je zamontować (patrz rysunek).

### Wymiana baterii:

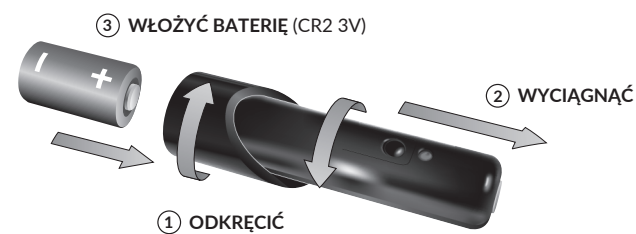

### Ostrzeżenia

Pomiędzy kolejnymi użyciami należy zachować zawsze co najmniej 10-sekundową przerwę.

Nie stosować w okolicy oczu.

W zależności od stopnia wrażliwości temperatura, w jakiej działa urządzenie, może być postrzegana jako nieprzyjemna.

U osób wrażliwych po zastosowaniu urządzenia może wystąpić krótkotrwałe zaczerwienienie skóry.

Podczas leczenia nie stosować jednocześnie maści, kremów lub żeli.

Konieczność wymiany baterii jest sygnalizowana trzykrotnie migającą diodą LED i trzykrotnym sygnałem dźwiękowym.

Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia lub widocznego nieprawidłowego działania!

### Wskazówki dotyczące przechowywania

Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przechowywać w suchym miejscu.

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię.

Nie czyścić urządzenia w wodzie.



### Wytwórca:

RIEMSER Pharma GmbH  
An der Wiek 7  
17493 Greifswald – Insel Riems  
Niemcy  
Tel.: +49 (0) 30 338427-0  
Faks: +49 (0) 38351 76-48

### Dystrybutor:

SUN-FARM Sp. z o.o.  
ul. Dolna 21  
05-092 Łomianki  
Polska  
Tel.: +48 22 350 66 69  
Faks: +48 22 350 77 03

Data uaktualnienia informacji: Listopad 2017 r.



Oznaczenie partii



Należy przestrzegać instrukcji użycia



Nie wyrzucać razem z odpadami komunalnymi

